

## 搬送用救急車機器点検手順

### 1 毎日の点検

1	エンジン始動	エンジン始動
2	外部電源	外部電源コンセント取付
3	室内灯点灯	室内灯・患者灯・作業灯・赤色灯の点灯確認
4	酸素・空気	①酸素（2本）・空気（2本）のバルブを開放する。 残量を確認する。（レベル5以下は交換） ②オキシマイザーのメモリ（保育器上部）を確認する。 ③解放した酸素（2本）・空気（2本）のバルブを閉じる。 ④空気、酸素の漏れを確認する。 ⑤ブレンダーのつまみを開放し、たまった酸素・空気を流す。 ⑥ブレンダーつまみを閉める。
5	加温加湿器	①加温加湿器のメモリを確認する。 ※1と2の間にセットされていることを確認 ②吸引器の吸引スイッチをオンにする。 ③チューブの先に指を当て、吸引状態を確認する。
6	保育器	保育器の温度、酸素・空気の漏れを確認する。 ※漏れ等があった場合はボンベのねじの緩み、チューブのセット等による不具合を確認する。

### 2 その他

#### (1) リフト点検

リフトに不具合がないか点検する。

#### (2) チャイルドシート

- ①ベビーの体重 2,500g 以上に使用する。
- ②チャイルドシートにタオルを敷く
- ③使用後は所定の位置に戻して固定する。
- ④取付椅子を戻す。